



Lacrisun TONIC 5%

Soluzione oftalmica ipertonica 5%

“LACRISUN TONIC” 5% è una soluzione oftalmica ipertonica per il trattamento dell'edema corneale che si verifica in seguito ad un danno meccanico, tossico, distrofico o infiammatorio.

“LACRISUN TONIC” 5% rendendo la lacrima ipertonica richiama, per effetto osmotico, l'eccesso di acqua dal tessuto corneale, riducendone lo stato edemigeno.

INDICAZIONI PER L'USO

“LACRISUN TONIC” 5% è indicato per:

- Disagio visivo, bruciore e irritazione oculare causati da edema corneale.
- In caso di un abnorme accumulo di fluidi causato dall'edema corneale, in presenza o meno di infiammazione o di traumi contusivi dopo interventi di refrattiva o di chirurgia oftalmica, cataratta, trapianti, distacchi di retina, trapianti di cornea, scompensi dell'endotelio corneale ed in tutti gli scompensi della cornea distrofici, meccanici, tossici e infiammatori.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il flacone e rimuovere il tappo di protezione.
2. Premere delicatamente il flacone e instillare 2 gocce in ciascun occhio; ripetere l'operazione in base alle esigenze.

Dopo l'uso chiudere immediatamente il flacone: il contenuto rimasto può essere riutilizzato fino a 3 mesi dopo la prima apertura.

COMPOSIZIONE

Riboflavina sodio fosfato (0.075%),
Sodio cloruro (5%), Vitamina E TPGS,
Sodio ialuronato, L-prolina, L- glicina,
L-leucina, L-lisina cloridata,
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato,
Sodio fosfato monobasico monoidrato,
Acqua purificata.
Senza conservanti.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare nei casi di riconosciuta intolleranza o ipersensibilità ai suoi componenti.
- Non usare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di problemi durante l'uso, interrompere il trattamento e consultare un medico.
- Durante l'applicazione del prodotto, non toccare l'occhio o qualsiasi altra superficie con la punta dell'erogatore.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
- Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate nel foglio illustrativo.





- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- La soluzione può macchiare superfici e tessuti.
- In rari casi sono stati riscontrati fenomeni di microcalcificazioni corneali in pazienti con pregresse patologie corneali e trattati con preparazioni oftalmiche contenenti fosfati. In tal caso si consiglia di utilizzare il prodotto sotto la supervisione del proprio medico.
- Soluzione trasparente di colore giallo paglierino. In caso di contatto con pelle o vestiti, è facilmente rimovibile.

È possibile segnalare eventi avversi al Fabbricante tramite l'indirizzo e-mail info@iromedgroup.com. Segnalando eventi avversi, è possibile contribuire alla sicurezza di questo prodotto.

Eventuali eventi gravi devono essere notificati al produttore e all'autorità competente del paese in cui questo prodotto è stato utilizzato.

CONTENUTO

Flacone multidose da 10 ml, senza conservanti.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Dopo l'uso chiudere il flacone: il contenuto rimasto può essere riutilizzato fino a 3 mesi dopo la prima apertura.

Conservare lontano da fonti di calore e comunque a temperatura inferiore a 25 ° C.

SCADENZA

A confezione integra non superare la data di scadenza indicata sull'astuccio e sul flacone.

Non separare il contenuto dalla confezione esterna e dal foglio illustrativo, allo scopo di avere tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo del prodotto.

IROMED GROUP S.r.l.
Via Tempo del Cielo 3/5
00144 Roma (Italia)

Diadema Farmaceutici Srl
Via G. Malasoma, 14/16
56121 Pisa (Italia)

CE 0373 DISPOSITIVO MEDICO
conforme alla direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.



RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Istruzioni	Astuccio
PAP 22	PAP 21
CARTA	
Tappo	Flacone e sigillo
LLDPE 4	LDPE 4
PLASTICA	

VERIFICARE LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

Rev.03 del 05/2022

