

IDRAXIL SPRAY OFTALMICO

DISPOSITIVO MEDICO



A base di lattoferrina, acido ialuronico e vitamina E (tocoferolo)

USO AD OCCHI CHIUSI

Indicazioni: il dispositivo medico IDRAXIL SPRAY OFTALMICO è indicato per alleviare i sintomi associati alla secchezza dell'occhio (Dry Eye Syndrome) e l'irritazione perioculare. Previene e contrasta la disidratazione della superficie oculare dovuta allo stress ambientale (aria condizionata, esposizione al vento, polvere, allergeni, inquinamento) e visivo (da utilizzo di lenti a contatto, da videoterminali, da condizioni di luce aggressive) proteggendo l'occhio e contribuendo quindi a mantenere e rigenerare le difese naturali. Dona sollievo all'occhio e alla zona perioculare e palpebrale in caso di occhi sensibili, secchi e irritati, anche in caso di utilizzo di lenti a contatto. A base di Acido ialuronico, Lattoferrina e Vitamina E. L'acido ialuronico ad alto peso molecolare lubrifica e idrata la superficie perioculare. La lattoferrina è una sostanza normalmente presente nel fluido lacrimale con attività antinfiammatoria e inibente la crescita microbica. La vitamina E è un potente antiossidante naturale che tutela l'integrità del film oculare.

L'invecchiamento e alcune patologie oculari come l'occhio secco, la cheratite e la congiuntivite di diverse eziologie determinano una diminuzione della lattoferrina lacrimale, rendendo questi individui più suscettibili alle infezioni oculari. La formulazione con lattoferrina aiuta a mantenere le difese naturali dell'occhio quando queste sono diminuite dalle patologie oculari. Il prodotto inoltre agisce come antiossidante fungendo da barriera per i radicali liberi.

Composizione: Lattoferrina, acido ialuronico, sodio cloruro, fenossietanolo, vitamina E (tocoferolo), polisorbato-20, acqua.

Modo d'uso: Per la migliore efficacia si consiglia di agitare il dispenser prima dell'uso. Mantenere ad una distanza di 10 cm dalla palpebra chiusa. Spruzzare 1-2 volte sulla palpebra chiusa per 3-4 volte al giorno. Il prodotto è idoneo per un uso quotidiano e nei portatori di lenti a contatto.

Avvertenze: Uso esterno. Non erogare con l'occhio aperto. Non ingerire. Chiudere la confezione dopo l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia verso uno dei componenti. La lattoferrina è una proteina estratta dal latte e pertanto se ne sconsiglia l'uso in caso di allergia alle proteine del latte.

Non sono note interazioni con principi attivi farmaceutici ed in mancanza di dati clinici disponibili per l'uso in gravidanza, allattamento, sotto i 6 anni e in caso di utilizzo concomitante con farmaci si consiglia di consultare un medico. L'uso prolungato di prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione: nel caso in cui tali fenomeni dovessero manifestarsi è opportuno sospendere il trattamento e consultare il medico. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata. Non utilizzare oltre alla data di scadenza. Se i sintomi persistono consultare il medico. Una volta aperto il contenitore, il dispositivo medico può essere utilizzato fino a 6 mesi.

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. La data di scadenza è riferita al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Contenuto: 10 ml e

Data ultima revisione: Ottobre 2022