



Lacrisun ANTIOX

Soluzione oftalmica antiossidante

ISTRUZIONI PER L'USO

LACRISUN ANTIOX è una soluzione oftalmica antiossidante a base di Riboflavina sodio fosfato 0.05%, Vitamina E TPGS, MSM, amminoacidi e acido ialuronico.

LACRISUN ANTIOX contrasta l'irrigidimento del cristallino causato dall'azione foto-ossidativa, rallentando il processo di invecchiamento.

LACRISUN ANTIOX protegge il cristallino oculare dai danni foto-ossidativi contribuendo al mantenimento della sua capacità antiossidante totale.

LACRISUN ANTIOX contrasta la formazione dei radicali liberi, corresponsabili dell'opacizzazione del cristallino.

LACRISUN ANTIOX può essere utilizzato dai portatori di lenti a contatto.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il flacone e rimuovere il tappo di protezione.
2. Premere delicatamente il flacone e instillare 1/2 gocce in ciascun occhio; ripetere l'operazione in base alle esigenze.

Dopo l'uso chiudere il flacone: il contenuto rimasto può essere riutilizzato fino a 3 mesi dopo la prima apertura. Può essere utilizzato con le lenti a contatto.

COMPOSIZIONE

Riboflavina sodio fosfato 0.05%, Sodio cloruro, Vitamina E TPGS, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, Sodio ialuronato, Metil Sulfonil Metano, Sodio fosfato monobasico monoidrato, L-prolina, L-glicina, L-leucina, L-lisina cloridrato, Acqua purificata.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare nei casi di riconosciuta intolleranza o ipersensibilità ai suoi componenti.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.



- La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

- In rari casi sono stati riscontrati fenomeni di microcalcificazioni corneali in pazienti trattati con pregresse patologie corneali e trattati con preparazioni oftalmiche contenenti fosfati. In tal caso sospendere immediatamente il trattamento e consultare il proprio medico.

- Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate nel foglio illustrativo.

- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

È possibile segnalare eventuali effetti indesiderati al Fabbricante all'indirizzo email info@iromedgroup.com.

La segnalazione di effetti indesiderati contribuisce alla sicurezza del dispositivo. Eventuali incidenti gravi vanno segnalati al Fabbricante e all'Autorità Competente per il paese in cui il dispositivo è stato utilizzato.

CONTENUTO

1 flacone multidose da 3 ml, senza conservanti.


MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Immediatamente dopo l'uso chiudere il flacone: il contenuto rimasto può essere riutilizzato fino a 3 mesi dopo la prima apertura. Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

SCADENZA

A confezionamento integro, non superare la data di scadenza indicata sull'astuccio e sul flacone.


Non separare il contenuto dalla confezione esterna e dal foglio illustrativo, allo scopo di avere tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo del prodotto.

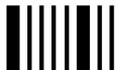

IROMED GROUP S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5
00144 Roma (Italia)

Diadema Farmaceutici Srl
Via G. Malasoma, 14/16
56121 Pisa (Italia)

CE 0373 **DISPOSITIVO MEDICO**
conforme alla direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.

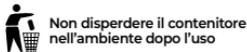

RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Istruzioni	Astuccio
PAP 22	PAP 21
CARTA	
Tappo	Flacone e sigillo
LLDPE 4	LDPE 4
PLASTICA	

VERIFICARE LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

Rev.03 del 05/2022

DIADEMA
Farmaceutici